



3, Petite rue  
F- 55170 ANCERVILLE  
Tél. : 03.29.75.20.80  
Fax. : 03.29.75.21.56  
<http://www.canule.com>  
E.mail : [jmasarl@wanadoo.fr](mailto:jmasarl@wanadoo.fr)  
SIRET 378 293 757 00019 NAF 331B

**SYSTEME JMA  
ADAPTATEUR JMA 080  
Pour seringue FARO**


Réf. S908/S 906  
SR 903/SR 906  
SM 903 / SM906



MONTAGE DE L'ADAPTATEUR sur seringue  
FITTING THE ADAPTER to the syringe  
COLOCACION DEL ADAPTATOR en las jeringas  
PLAATSEN VAN DE ADAPTER op het spuitstuk


1

Déclipser l'embout de la seringue  
Unclip the extension piece from the syringe  
Soltar la boquilla de la jeringa  
Opzetstuk losklikken van het spuitstuk

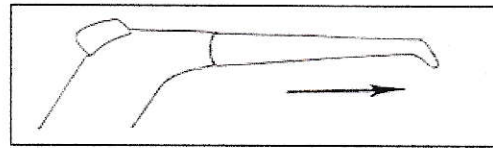


2

Cliquer l'adaptateur  
Clip the adapter into place  
Introducir el adaptador  
Klik de adapter vast

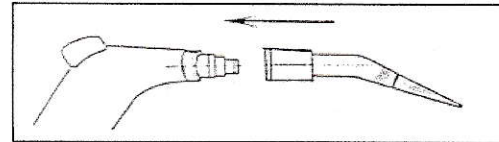


3


- ▲ Visser la canule en la bloquant. Vérifier. S'assurer de la bonne tenue de la canule en activant, avant utilisation en bouche, les fonctions air/eau/spray.
- ▲ Screw the cannula by blocking it. Check. Make sure the cannula is in good shape by activating the air/water/spray functions before use in the mouth.
- ▲ Atornillar la cánula bloqueándola. Controlar. Asegúrese de que la cánula esté en buen estado activando las funciones de aire/agua/spray antes de usarla en la boca.
- ▲ Schroef de canule vast door deze te blokkeren. Rekening. Zorg ervoor dat de canule in goede staat verkeert door de lucht/water/spray-functies te activeren voor gebruik in de mond.

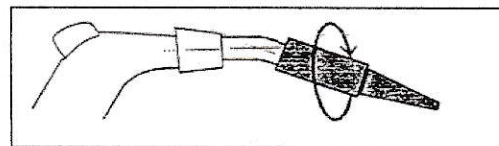

**SYMBÔLES UTILISES SUR L'ETIQUETAGE  
GEBRUIKTE SYMBOLEN OP DE LABELS  
SYMBOLS USED ON LABELING  
SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS ETIQUETAS**

 JMA SARL  
3 Petite Rue  
55170 ANCERVILLE  
Tél. : 03.29.75.20.80  
Fax: 03.29.75.21.56  
<http://www.canule.com>  
[jmasarl@wanadoo.fr](mailto:jmasarl@wanadoo.fr)

 Consulter le mode d'emploi  
Consult instructions for use  
Consulte las instrucciones de uso  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

 Ne pas réutiliser  
Do not reuse  
No reutilizar  
Eenmalig gebruiken



Rejeter dans le cas où l'un des emballages serait endommagé  
Discard if any of the containers is damaged  
Desechar si alguno de los envases se halla danado  
Weggoeien indien een van de verpakkingen beschadigd is



Produit non stérile  
Not sterile  
No estéril  
Niet steriel



Numéro de lot  
Batch number  
Número de lote  
Serienummer



Référence produit  
Product reference  
Referencia del producto  
Productreferentie



Date de fabrication  
Date of manufacture  
Fecha de fabricacion  
Fabricagedatum



Dispositif médical  
Medical device  
Dispositivo médico  
Medisch apparaat

